

راهنمایی های عمومی :

- ۱- دستگاه را در محل مناسب قرار دهید از قراردادن دستگاه در مجاورت دستگاههای حرارتی و برودتی ، محل های پرسر و صدا ، پنجره و نور مستقیم آفتاب خودداری نمایید.
- ۲- برای تمیز کردن کناره های شیشه ای تخت احیاء از مواد الکل، آستون و هرگونه حلال آلی استفاده ننمایید. برای اینکار بهتر است از مواد غیر الکلی بسیار رقیق (۱ درصد) استفاده شود. همچنین این قسمت نباید در معرض تابش نور ماوراء بنفش قرار بگیرد.
- ۳- تا حد ممکن از جدا کردن سنسور پوستی از دستگاه خودداری نمایید و برای وصل کردن مجدد سنسور، با توجه به علامت روی سنسور، آن را با دقت و به آرامی در محل مربوطه وارد نمایید.
- ۴- در صورت بروز مشکل در عملکرد دستگاه با واحد فنی شرکت دریای طب اندیشانه و با شماره های ۰۲۳۳۲۶۷۵۰ و ۸۳۸۳۵۱۵۲ تماس حاصل نمایید. از تعمیر دستگاه توسط افراد غیر متخصص اکیدا خودداری نمایید.

راهنمای استفاده از دستگاه :

- ۱- کلید Power (کلید سبز رنگ پشت دستگاه) را در حالت روشن قرار داده. سپس می توانید با فشردن کلید Control power که بر روی هد دستگاه قرار دارد دستگاه را روشن نمایید.
- ۲- با کمک کلید Light Power که بر روی هد دستگاه قرار دارد لامپ روشنایی/خونگیری را روشن نمایید.
- ۳- دستگاه دارای ۳ حالت عملکردی میباشد:

۱- حالت گرم کردن اولیه (Pre - warm) ۲- کنترل دستی (Manual) ۳- استفاده از سنسور پوستی (Baby)

- ۴- حداقل ۱۰ دقیقه قبل از قراردادن نوزاد در دستگاه، دستگاه را روشن کنید و اجازه دهید در این مدت در مد Pre-Warm کار کند تا به شرایط ثبات حرارتی برسد. مد Pre-Warm به هیچ وجه مناسب کنترل گرما نبوده و پس از قرار گرفتن نوزاد در دستگاه، مد دستگاه باید تغییر کند.
- ۵- در مد Baby دمای بدن نوزاد با دمای تنظیم شده پیوسته مقایسه شده و میزان قدرت هیتر به صورت خودکار به گونه ای تنظیم میشود که دمای بدن نوزاد برابر با دمای تنظیمی گردد. پس از فشردن کلید Keypad lock (کلید با کمک کلید Mode select Baby را انتخاب نموده و با کمک کلید های و دمای مناسب را در پنجره Set temperature تنظیم نمایید. سنسور پوستی را همیشه روی قسمت مناسب از بدن نوزاد قرار دهید و مراقب باشید که هیچ گاه از بدن نوزاد جدا نشود.
- ۶- در مد دستی (Manual) میزان قدرت هیتر و گرمای تابشی توسط کاربر تنظیم میشود. در این مد میتوان سنسور را از دستگاه جدا کرد. این مد بیشتر در اتاق عمل و زایشگاه مورد استفاده قرار میگیرد. پس از فشردن کلید Keypad lock (با کمک کلید) مد Manual را انتخاب نموده و سپس با کمک کلید های و می توانید قدرت هیتر را از ۰ تا ۱۰۰ درصد تنظیم کنید. قدرت هیتر را می توانید در نمایشگر مخصوص آن مشاهده کنید.
- در این حالت دستگاه هر ۱۵ دقیقه یکبار آلارم Check می زند تا پرسنل برای بررسی وضعیت نوزاد و دمای بدنش بالای تخت حضور یابند.
- ۷- هد دستگاه (قسمت وارمر) در صورت نیاز ، مثلاً برای انجام رادیولوژی از نوزاد می تواند به دو طرف حرکت و در زاویه های 30° و 60° قرار بگیرد.
- ۸- برای زاویه دادن به تخت با استفاده از دسته زیر تخت می توانید، تخت را تا 15° درجه زاویه دهید.

پیامهای خطای دستگاه

علت آلارم	روشن شدن LED
سیستم تغذیه یا فیوزهای دستگاه دچار مشکل شده است .	POWER
سنسور پوستی آسیب دیده است .	SENSOR
دمای سنسور پوستی از حد مجاز بالاتر رفته است.	OVERHEAT
بین دمای واقعی و مقدار تنظیم شده به دلیل عوامل محیطی یا نقص فنی اختلاف وجود دارد.	High/Low
هر ۱۰ دقیقه یکبار در مد Manual برای بررسی نوزاد	Check
سنسور به درستی به بدن نوزاد متصل نشده.	Set

- آلارم های صوتی توسط کلید غیر فعال می شود، چراغ مربوط به آلارم در صورت برطرف شدن مشکل خاموش می شود.
- در صورت برطرف نشدن مشکل پس از ۵ دقیقه مجدداً آلارم صوتی فعال می شود .